

歩行器ガイド



歩行器は四脚のフレーム構造で、足腰の筋力が低下して自立歩行が困難な方が体重を支えながら移動するための福祉用具です。歩行補助杖よりも支持性が求められる際に使用されます。道具を利用して安全に歩行するためには、ご利用者さまの体力や身体機能に適したものを選ぶことが大切です。

歩行器



持ち上げ型歩行器

歩行方法は、両手で歩行器を持ち上げ前に置き、グリップに体重を支えてから患側・健側の順で足を出す三動作歩行で、比較的動作学習がしやすい歩行方法です。折りたためない固定型歩行器と折りたたみができる折りたたみ型歩行器があります。また二段式のグリップで椅子やトイレからの離着席をサポートできる機種もあります。基本的に室内用です。



キャスター付き歩行車

前脚のみ、あるいは四脚にキャスターが付いたものです。いずれもキャスターを滑らせて使用しますが、体重をかけるとストッパーが作用して固定されます。歩行器を前に振りだす時、上肢や体幹の筋力が弱くて歩行器を持ち上げるのが困難な方に向いています。基本的に室内用です。

交互型歩行器(現在取り扱いがありません)

左右のフレームが個々に動かせるので、歩く時には左右交互に動かし、右側の歩行器・左足・左側の歩行器・右足の4回の動作の歩行となります。この歩行動作の方が固定型に比べて難しい動作です。比較的、四肢の筋力低下の方に向いています。基本的に室内用です。

歩行車



四輪歩行車

多くの機種において前輪は360度回転する自在輪、後輪は固定輪で、軽く押しながら歩行することが可能です。ハンドグリップには手動ブレーキが付いているのでブレーキをかけながらスピードを調節することができます。また、より安定した歩行が可能な、肘を置いて前方で操作する前腕支持型歩行車もあります。疲れたら座ることができる座面が付いているものもあります。多くの機種が屋内外で使用できます。



前腕支持型歩行車

多くの機種において車輪はすべて360度回転する自在輪か、あるいは設定によって自在輪です。フレーム上部のU字形のパッドで前腕部を支持しながら歩行をサポートします。足腰が弱った方の歩行訓練やリハビリ用としても使用されています。馬蹄歩行器とも呼ばれます。基本的に室内用です。

シルバーカーと歩行車との違い

介護保険対象外のシルバーカーは、介護保険対象である歩行器(歩行車)と一見よく似た商品ジャンルですが、両者には明確な違いがあります。シルバーカーは歩行器のように歩行困難な人が使う用具ではなく、自立歩行が可能な人が買い物などの際の荷物の運搬や比較的長距離を歩く際の休憩に用いるための用具です。歩行器のように支持面の中に身体を入れるような構造になっていないためにグリップへの体重の負荷が不十分で歩行を安定させるための支持力を有していません。

歩行器ラインナップ

持ち上げ型歩行器	ユーバ産業 H-0288 P.30	星光医療器製作所 10型 M-D P.30	イーアス Rec01 P.30	
	屋内用	屋内用	屋内用	
	全幅 (mm)	530~630	530~540	480
	奥行き (mm)	480~520	510~545	440
	全高 (mm)	660~840	775~895	700~850
重量 (kg)	3.0kg	3.0kg	2.5kg	
高さ調節	8段階	6段階	7段階	

キャスター付き歩行車	イーストアイ SAWLHR ハイ P.30	イーストアイ SAWLR スタンダード P.30	イーストアイ SAWLSR ミニ P.30	ユーバ産業 H-0294WT P.30	
	屋内外	屋内外	屋内外	屋内用	
	全幅 (mm)	645	630	610	610~700
	奥行き (mm)	570	570	550	600~630
	全高 (mm)	885~985	795~895	720~820	790~880
重量 (kg)	4.0kg	3.8kg	3.7kg	4.3kg	
高さ調節	5段階	5段階	5段階	5段階	

四輪歩行車	竹虎 レッツゴー P.31	RTワークス ロボットアシスト ウォーカー RT.3 P.32	星光医療器製作所 アルコールステラ 抑速ブレーキ付 P.32	島製作所 シンフォニー バスケットSP P.33	島製作所 シンフォニー SP P.33	島製作所 シンフォニー SPスリム P.33	イーストアイ RS5470 P.33	竹虎 ハッピーII P.34	竹虎 ハッピーミニ ツール P.34	竹虎 ハッピーII NB P.34	竹虎 ハッピーミニ P.34	アロン化成 リトルターンII 抑速プラス P.35	アロン化成 リトルターンII P.35	アロン化成 リトルターンII ハイタイプ P.35	
	屋内用	屋外向き	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外
	全幅 (mm)	540	570	529	510	500	480	460	585	535	555	500	500	480	480
	奥行き (mm)	600	650	641	660	560	600	520	655	595	620	575	650	650	650
	全高 (mm)	840~915	745~940	772~889	810~925	785~880	775~865	740~865	780~920	700~840	780~870	700~790	740~965	740~965	740~860
重量 (kg)	7.0kg	約10kg	9.2kg	約7.2kg	5.9kg	4.9kg	6.2kg	8.0kg	6.7kg	7.7kg	6.5kg	8.8kg	約6.9kg	約6.5kg	
高さ調節	4段階	7段階	7段階	5段階	4段階	4段階	6段階	7段階	7段階	5段階	5段階	10段階	10段階	6段階	
杖立	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	

四輪歩行車	アロン化成 リトルターン 抑速付 P.35	ウィズワン H1CSN P.35	ウィズワン H1W-NGY P.35	ウィズワン H1LR-TR P.35	幸和製作所 ジスタ WAW33 P.36	幸和製作所 WAW22 P.37	幸和製作所 ミケーレ WAG01 P.37	幸和製作所 WAW15 P.37	幸和製作所 サンティノ WAG02 P.37	幸和製作所 WAW06 P.37	幸和製作所 WAW05 P.37	幸和製作所 WAW04 P.37	幸和製作所 WAW21 P.37	
	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋外向き	屋内外	屋外向き	屋内外	屋外向き	屋内外	
	全幅 (mm)	500	570	540	530	480	480	535	520	500	520	470	470	450
	奥行き (mm)	650	650	550	520	600	575	605	625	635	640	580	580	595
	全高 (mm)	740~860	830~940	840~930	755~845	715~925	700~880	790~950	740~920	800~950	740~920	640~910	640~910	670~910
重量 (kg)	約8.5kg	5.1kg	4.5kg	3.95kg	5.9kg	5.6kg	5.9kg	約5.3kg	4.9kg	約5.6kg	約5.5kg	約4.5kg	約4.9kg	
高さ調節	6段階	6段階	4段階	4段階	8段階	6段階	6段階	7段階	6段階	7段階	10段階	10段階	9段階	
杖立	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	

前腕支持型歩行車	星光医療器製作所 アルコール SK型 P.31	星光医療器製作所 アルコール 3型中 P.31	星光医療器製作所 アルコール SK型mini P.31	星光医療器製作所 アルコール ウィット-T P.31	日進医療器 トレウォーフ スリム P.31	島製作所 シンフォニー ワイドSP II P.33	ウェルパートナース friend WF-1 P.34	ウェルパートナース friend II WF-2 P.34	幸和製作所 WAW23 P.36	幸和製作所 WAW27 P.36	幸和製作所 WAW25 P.36	
	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	
	全幅 (mm)	530	520	500	515	550	605	510	555	480	545	480
	奥行き (mm)	575	775	515	570	620	710	645	675	645	675	645
	全高 (mm)	790~1060	820~1090	750~1020	875~1075	850~1050	930~1020	760~960	915~1150	840~1120	840~1120	840~1120
重量 (kg)	12kg	11.2kg	約11.8kg	13kg	12.6kg	8.5kg	8.5kg	9.5kg	約7.9kg	8.8kg	約8.8kg	
高さ調節	無段階	無段階	無段階	6段階	無段階	4段階	7段階	8段階	10段階	10段階	10段階	
杖立	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	

特殊寝台・付属品 P2-19
 床すれ防止用具 P20-25
 体位変換器 P26
 歩行補助杖 P27
 歩行器 P28-37
 手すり P38-51
 車いす・付属品 P52-75
 スロープ P76-78
 移動用リフト P79-85
 自動排泄処理装置 P85
 徘徊感知機器 P86-89


サービスコード 歩行器:171009

セーフティーアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

キャスター付き歩行車 非課税

折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です

屋内外
向き

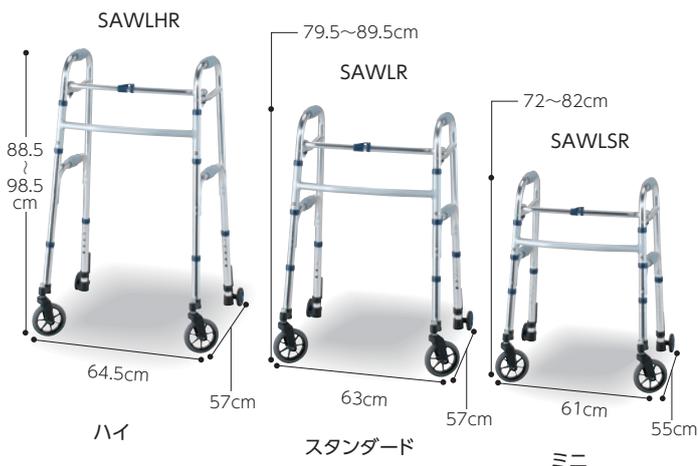

材質/アルミ (一部スチール) ●最大使用者体重/100kg

SAWLHR ハイ

TAIS	00465-000100	商品番号	09-1000-0
サイズ/幅645×奥行570×高さ885~985mm 重量/4.0kg			
月極	1割	2割	3割

SAWLR スタANDARD

TAIS	00465-000017	商品番号	09-1001-0
サイズ/幅630×奥行570×高さ795~895mm 重量/3.8kg			
月極	1割	2割	3割

SAWLSR ミニ

TAIS	00465-000054	商品番号	09-1002-0
サイズ/幅610×奥行550×高さ720~820mm 重量/3.7kg			
月極	1割	2割	3割

ニュースライドフィットEX

ユーバ産業

非課税

体格や症状に合わせて幅、高さ、
ハンドル角度が調節可能な伸縮歩行器

屋内用



H-0288 Hタイプ 選択制

TAIS	01096-000074	商品番号	09-1120-0
サイズ/幅530~630(590)×奥行480~520(130)×高さ660~840(790)mm 重量/3.0kg			
月極	1割	2割	3割

H-0294WT Hタイプ

TAIS	01096-000077	商品番号	09-1130-0
サイズ/幅610~700(670)×奥行600~630(140)×高さ790~880(810)mm 重量/4.3kg			
月極	1割	2割	3割

アルコー10型 M-D

星光医療器製作所

持ち上げ型歩行器

非課税

後輪がソリ状になっているため
抵抗をかけながら歩行することができます

屋内用



Rec01 コンパクト

イーアス

選択制

持ち上げ型歩行器

非課税

1台に3役の使い方ができる座面付固定型歩行器
歩行をする・腰を掛ける・立ち上がる

屋内用



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

選択制とは、ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度です。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

アルコーSK型

星光医療器製作所

高性能コンパクト歩行車

前腕支持型歩行車 非課税

4輪自在 屋内用



高さ調整機能 グリップ



抵抗器機能 ガードバンパー

サイズ

幅530×奥行575×高さ790~1060mm
キャスター径:φ100mm

重量 12kg 材質 スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000040
商品番号 09-4010-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコー3型中

星光医療器製作所

病院・施設等の普及型歩行器
杖・固定型歩行器等での歩行の不安な方に

前腕支持型歩行車 非課税

4輪自在 屋内用



サイズ

幅520×奥行775×高さ820~1090mm

重量

11.2kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000008
商品番号 09-4030-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコーSK型mini

星光医療器製作所

アルコーSK型よりさらにコンパクトになった
在宅向け歩行車

前腕支持型歩行車 非課税

4輪自在 屋内用



握りやすいパ
ー形状グリップ



歩行器速度の調節が
行える抵抗器付き。 家具や壁などを
傷つけにくいガード
バンパー付き。

サイズ

全幅500×奥行515×高さ750~1020mm
キャスター径:φ100mm

重量 約11.8kg 材質 スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000087
商品番号 09-4020-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコーウィット-T(抵抗器付)

星光医療器製作所

コンパクトタイプの折りたたみ歩行車

前腕支持型歩行車 非課税

4輪自在 屋内用

新掲載



- マット部 抗菌仕様
- 幅780mmの廊下で
方向転換が可能
- ノブネジを調整する
ことで歩行速度の調
整ができる抵抗器付
- 折りたたみ可能で
収納に便利

サイズ

幅515×奥行570×高さ875~1075mm

重量

13kg

材質

マット部: ウレタンレザー製 本体: スチール製

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000094
商品番号 09-4480-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

トレウォークスリム

日進医療器

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず
ストッパーハンドル付きの手軽に扱える歩行車です

前腕支持型歩行車 非課税

4輪自在可 屋内用



- ワンタッチの高さ調整に
立ち上がりを安全に行う為の
ストッパー機能付き



サイズ

幅550×奥行620×高さ850~1050mm
前輪φ6インチ
後輪100mm 固定・回旋切替式(工具必要)

重量 12.6kg 材質 スチール

●最大使用者体重/75kg

TAIS 00175-000283
商品番号 09-4000-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

レッツゴー

竹虎

洗練されたデザインの
室内専用歩行車

四輪歩行車

屋内用



- 室内での移動に適した
シンプル&スタイリッシュなデザイン
- 便利なトレイ、バスケット付き
- ブレーキレバーを押し下げると
パーキングブレーキがかかります
- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(4段階)

サイズ

幅540×奥行600×高さ840~915mm
キャスター径:φ150mm 折りたたみ時:幅220mm

重量

7.0kg

材質

本体フレーム:アルミニウム・スチール
トレイ:ポリプロピレン
ハンドルグリップ:ニトリルブタジエンゴム

●最大使用者体重/80kg

カラー:レッド

TAIS 00110-000098
商品番号 09-4060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 歩行器:171009

ロボットアシストウォーカー RT.3

RTワークス

新掲載

四輪歩行車

電動アシストだから坂道でも安心・快適な歩行

屋外向き



ロボット搭載

電動アシストの特徴 実用登坂角度: 7° 速度超過制限: 1.5~6km/h

<p>上り坂 アシストで楽々</p> <p>自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます</p>	<p>下り坂 適度に減速</p> <p>自動的にブレーキが働き ゆっくり歩けます</p>	<p>傾いた道 片流れ防止</p> <p>ハンドルを取られることなく安定して進めます</p>	<p>坂道で手を離すと 自動的に停止</p> <p>グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知</p>	<p>速度を検知すると 自動で減速</p> <p>自動的にブレーキがかかり転倒を防止します (制限速度の値は調整可能)</p>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

疲れた時は座って休憩




かるがる持ち運び



ハンドル高さ調節 7段階

74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94cm

手元で簡単操作

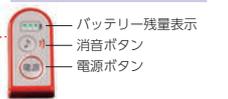

累計歩行距離がわかる

累計の歩行距離を確認したいときに確認できます

買い物した荷物もたっぷり収納



コンパクトバッテリー

連続動作: 約 4 時間
充電時間: 3 時間
電源: リチウムイオンバッテリー (専用充電器付属)



サイズ
幅570×奥行650×高さ745~940mm(7段階)
折りたたみ時:幅260×奥行650×高さ745mm

材質
●最大使用者体重 / 100kg
●防水機能 / 防雨型
●付属品: バッテリー・専用充電器
重量
約10kg

TAIS	01560-000005	商品番号	09-4510-1
月極	1割	2割	3割

アルコーステラ 抑速ブレーキ付

星光医療器製作所

新掲載

四輪歩行車

屋内外向き
杖立あり



一人ひとりのニーズに寄り添い、日常のあらゆるシーンをサポートします

ご利用者さまの身長に合わせて使いやすい高さ調整が可能

ハンドル部の高さ調整

4段階の高さに調整可能
○ 77.2 ~ 88.9cm (床から)

脚部の高さ調整

3段階の高さに調整可能
○ 48 / 50.5 / 53cm (床から)



コンパル2を採用



静音性が向上し、抑速力の設定が4段階調整可能。追加になった「微弱」設定にすることで、下り坂など必要なときに抑速ブレーキがかかります。



視認性に配慮したパーツ



足への干渉を軽減します
荷物が見やすくなっています

買い物カゴ搭載可



座面の上に買い物カゴをのせられます (脱落下防止フック付き)

サイズ
幅529×奥行641×高さ772~889mm(7段階)
折りたたみ時:幅529×奥行510×高さ785mm
座面高:480-505-530mm 座面:幅310×奥行270mm

材質
●最大使用者体重 / 100kg
●防水機能 / 防雨型
●付属品: バッテリー・専用充電器
重量
約10kg

TAIS	00125-000111	商品番号	09-4490-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

シンフォニーバスケットSP

島製作所

新掲載

四輪歩行車

前にも後ろにも座れる
買い物に便利な歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋内外向き

色柄

クラシック
ガーデンNB



●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/10kg

両側に座ることが可能



※前後での2人掛けはできません

カゴ受け付きで、買い物に便利

フタを上げると荷物を入れられ
買い物後の荷物もたっぷり入ります
※カゴは付いてません



3WAY キャスター

直進固定(0度)、左右
各60度、フリ- (360
度)の3種類の設定が
できます



持ち運びしやすい



プレートにも反射シール



サイズ	材質	重量
幅510×奥行660×高さ810~925mm(5段階) 折りたたみ時:幅510×奥行410×高さ870mm 座面高:470mm 座面:幅310×奥行270mm	本体:アルミ(粉体塗装) タイヤ:EVA ホイール:フタ:底部:PP バッグ:ポリエステル	約7.2kg

TAIS	00576-000052	商品番号	09-4460-1
月極	1割	2割	3割

シンフォニーSP

島製作所

四輪歩行車

片方のブレーキ操作でも両後輪を制御
簡単操作で扱いやすい歩行車

杖立あり 前輪2WAY 屋内外向き

色柄

CLブラウン



サイズ
幅500×奥行560×高さ785~880mm
折りたたみ時:幅500×奥行285×高さ865mm
座面高:410mm 座面:幅345×奥行270mm
キャスター径:約145mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイール:PP 袋部:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/100kg
5.9kg ●最大積載荷重/5kg

TAIS	00576-000014
商品番号	09-4250-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーSPスリム

島製作所

四輪歩行車

横幅約48cmで狭い場所でも小回りがきき
操作しやすい軽量コンパクトタイプ

杖立あり 前輪3WAY 屋内外向き

色柄

花柄紺



サイズ
幅480×奥行600×高さ775~865mm
折りたたみ時:幅480×奥行330×高さ690mm
座面高:440mm 座面:幅310×奥行260mm
キャスター径:約145mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイール:PP 袋部:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/75kg
4.9kg ●最大積載荷重/5kg

TAIS	00576-000039
商品番号	09-4310-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーワイドSPII

島製作所

前腕支持型歩行車 非課税

すべてがワイド、安心ゆったり設計の
前腕支持型歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋内外向き

色柄

Bグレー



サイズ
幅605×奥行710×高さ930~1020mm
折りたたみ時:幅605×奥行430×高さ1005mm
座面高:約430mm 座面:幅380×奥行280mm
キャスター径:約180mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイール:PP 袋部:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/80kg
8.5kg ●最大積載荷重/8kg

TAIS	00576-000044
商品番号	09-4260-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

セーフティーアームロータポケットRS5470

イーストアイ

四輪歩行車

いつでも座れる座面の付いた
コンパクトサイズの歩行車

屋内外向き



サイズ
幅460×奥行520×
高さ740~865mm(6段階)
折りたたみ時:幅460×奥行390×高さ820mm
座面:幅360×奥行240mm

重量 6.2kg 材質
本体:アルミ(一部スチール)
グリップ・タイヤ:合成ゴム

●最大使用者体重/100kg
●最大積載荷重/3kg

TAIS	00465-000111
商品番号	09-4420-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サービスコード 歩行器:171009

ハッピーIIトール

竹虎

四輪歩行車

シンプルで安全性に優れたハッピーIINBに高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外向き



サイズ

幅585×奥行655×高さ780~920mm(7段階)
座面高:500mm 座面:幅305×奥行305mm
キャスター径:φ190mm
折りたたみ時幅:445mm

材質

本体フレーム:アルミニウム 重量 8.0kg
座面:PVC

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00110-000127

商品番号 09-4330-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニトール

竹虎

四輪歩行車

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外向き



サイズ

幅535×奥行595×高さ700~840mm(7段階)
座面高:430mm 座面:幅280×奥行280mm
キャスター径:φ180mm
折りたたみ時幅:410mm

材質

本体フレーム:アルミニウム 重量 6.7kg
座面:PVC

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00110-000128

商品番号 09-4340-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーIINB

竹虎

四輪歩行車

シンプルで安全性と信頼性が高くスタンダードタイプの歩行車

屋内外向き



サイズ

幅555×奥行620×高さ780~870mm(5段階)
座面高:500mm 座面:幅305×奥行305mm
キャスター径:φ190mm
折りたたみ時幅:435mm

材質

本体フレーム:アルミニウム 重量 7.7kg
座面:PVC

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00110-000112

商品番号 09-4170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニ

竹虎

四輪歩行車

安全性と信頼性に定評のあるハッピーIINBの軽量・コンパクトタイプ

屋内外向き



サイズ

幅500×奥行575×高さ700~790mm(5段階)
座面高:430mm 座面:幅280×奥行280mm
キャスター径:φ180mm
折りたたみ時幅:395mm

材質

本体フレーム:アルミニウム 重量 6.5kg
座面:PVC

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00110-000103

商品番号 09-4180-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

friend WF-1 / friend II WF-2

ウェルパートナーズ

前腕支持型歩行車

非課税

肘をつけて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行
前腕支持型歩行車

- 自立可能な簡単折りたたみ機構
- 最大使用者体重/100kg

屋内外向き

friend WF-1

friend II WF-2



材質

本体:アルミ・ステンレス・一部スチール
前腕支持台:ビニールレザー・ウレタン・合板入り 収納袋:ビニールレザー

friend WF-1

※()内は折りたたみ時

サイズ/幅510(510)×奥行645(470)×高さ760~960(780~980)mm
座面高460mm 重量/8.5kg

TAIS 01009-000025

商品番号 09-4130-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

friend II WF-2

※()内は折りたたみ時

サイズ/幅555(555)×奥行675(500)×高さ915~1150(965~1200)mm
座面高500mm 重量/9.5kg

TAIS 01009-000028

商品番号 09-4140-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

リトルターン II 抑速プラス

アロン化成

新掲載

四輪歩行車

歩行速度や歩行バランスを最適化して安心して歩ける歩行車



屋内外
向き
杖立
あり


抑速力の設定 [4段階] **COMPAL**
 新たに「微弱」を追加し下り坂などの必要なときに抑速ブレーキがかかります



3WAY キャスター



●抑速ブレーキタイプの特徴

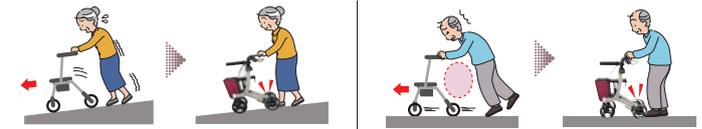

坂道では自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行可能

急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を防止

サイズ		材質	
幅500×奥行650×高さ740~965mm 折りたたみ時:幅270mm 座面高:470mm		座面:ポリエステル パップ:ナイロン ハンドルグリップ:エラストマー	
重量		TAIS	00221-000740
8.8kg		商品番号	09-4470-1
月極	1割	2割	3割

リトルターン II

アロン化成

四輪歩行車

多くの人の歩行を助ける歩行車



屋内外
向き
杖立
あり

サイズ
幅480×奥行650×高さ740~965mm
折りたたみ時:幅270mm 座面高:470mm

材質 重量
本体フレーム:アルミニウム 約6.9kg
ハンドルグリップ:エラストマー

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00221-000713
 商品番号 09-4430-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リトルターン ハイタイプ

アロン化成

四輪歩行車

コンパクトで小回りの良い歩行車
 外出時に歩行補助が必要な方に



屋内外
向き
杖立
あり

サイズ
幅480×奥行650×高さ740~860mm
折りたたみ時:幅260mm 座面高:470mm

材質 重量
本体フレーム:アルミニウム 約6.5kg
ハンドルグリップ:エラストマー

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00221-000456
 商品番号 09-4080-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リトルターン 抑速付

アロン化成

在庫限り

四輪歩行車

歩行速度に応じて抑速ブレーキが作動して転倒を防止
 狭い空間でも扱いやすいコンパクト設計



屋内外
向き
杖立
あり

サイズ
幅500×奥行650×高さ740~860mm
折りたたみ時:幅260mm 座面高:470mm

材質 重量
本体フレーム:アルミニウム 約8.5kg
ハンドルグリップ:エラストマー

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00221-000548
 商品番号 09-4070-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンキャンシットヌーボー H1CSN

ウィズワン

四輪歩行車

軽くてコンパクトにたためる
 イス付きワイドハイタイプ



杖立あり 前輪 3WAY 屋内外向き

サイズ
幅570×奥行650×高さ830~940mm(6段階)
折りたたみ時:幅330×奥行340×高さ885mm
座面高:480mm 座面:幅320×奥行250mm

材質 重量
本体:アルミ・プラスチック 5.1kg
袋:ナイロン
袋: EVA発泡

●最大使用者体重/75kg

●最大積載荷重/2kg

TAIS 00063-000041
 商品番号 09-4410-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンW H1W-NGY

ウィズワン

四輪歩行車

コンパクト・軽量トップクラス
 小回りが効くスリムモデルタイプ



前輪 3WAY 屋内外向き 杖立あり

サイズ
幅540×奥行550×高さ840~930mm(4段階)
折りたたみ時:幅260×奥行340×高さ880mm

材質 重量
袋部:綿(PVC加工) 4.5kg
車体部:アルミニウム

●最大使用者体重/75kg

TAIS 00063-000038
 商品番号 09-4290-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンレジェール H1LR-TR

ウィズワン

四輪歩行車

小柄な女性にぴったりサイズ



杖立あり 前輪 3WAY 屋内外向き

サイズ
幅530×奥行520×高さ755~845mm(4段階)
折りたたみ時:幅275×奥行320×高さ790mm

重量 3.95kg
材質

本体:アルミニウム 袋:ナイロン

●最大使用者体重/75kg

●最大積載荷重/前袋:2kg 後袋:5kg

TAIS 00063-000039
 商品番号 09-4370-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ジスタ WAW33

新掲載

四輪歩行車

幸和製作所

駐車ブレーキ操作が必要ない歩行車

杖立あり 屋内外向き



グリップから手を離すだけで 駐車ブレーキがかかる新たなブレーキシステム



①グリップから手を離す
グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります

②グリップを握る
グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

こんなヒヤリハットの経験、ありませんか？

人的要因のヒヤリハット

駐車ブレーキをかけ忘れて座ろうと（立ち上がろうと）したため、車体が動いて転倒しそうなことはありませんか？



ジスタなら！

駐車ブレーキ操作が不要

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかるので、かけ忘れすることなく安心です。



歩行車の構造が要因のヒヤリハット

立ち上がる時にブレーキレバーに引っかかり、意図せず駐車ブレーキが解除されてしまい、車体が動いて転倒しそうなことはありませんか？



ジスタなら！

座面を出した状態では 駐車ブレーキは解除されません

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。



ワンタッチステッキホルダー

クリップ式なので片手でかんたんに杖の着脱ができます。



荷物用フック

軽量の荷物をフックに掛けることができます。



カゴ載せ機能

歩行車のまま買い物ができます。



2WAY キャスター

かんたん操作で、キャスター回転角度を120°または360°に変更できます。



TAIS	00030-000241	商品番号	09-4500-1
月極	1割	2割	3割

シトレア WAW23

前腕支持型歩行車

幸和製作所

軽量・コンパクトな前腕支持型歩行車

屋内外向き



サイズ
幅480×奥行645×高さ840~1120mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm
座面高:480mm 座面:幅280×奥行290mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/75kg
約7.9kg ●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000226
商品番号 09-4360-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シトレアワイド WAW27

前腕支持型歩行車

幸和製作所

体格の大きい方でも使いやすい
ワイド設計の前腕支持型歩行車

●最大使用者体重/100kg
●最大積載荷重/5kg

屋内外向き



サイズ
幅545×奥行675×高さ840~1120mm
折りたたみ時:幅545×奥行430×高さ835mm
アームレスト高さ:770~1050mm
(10ポジション)
座面高:480mm 座面:幅340×奥行290mm
車輪:前輪/φ200mm 後輪/φ150mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

重量 8.8kg

TAIS 00030-000236
商品番号 09-4400-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シトレアR WAW25

幸和製作所

抑速ブレーキ内蔵後輪

「palli/パルル」搭載の前腕支持型歩行車

屋内外向き



抑速ブレーキ内蔵後輪「palli/パルル」

一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂も安心です。ブレーキは「強・中・弱」の3段階で調整が可能で、一般的なマイナスイヤードライバーで切り替え操作ができます。



屋内外でも使いやすい

車体幅がコンパクトなので取り回しがよく、屋内はもちろん屋内でも扱いやすい歩行車です。重量は約8.8kgと比較的軽量です。

高さ調整ネジ抜け防止

ネジが抜け落ちない仕様になっているため、紛失しにくいです。



サイズ
幅480×奥行645×高さ840~1120mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm
アームレスト高さ:770~1050mm
(10ポジション)
座面高:480mm 座面:幅280×奥行290mm
車輪:前輪/φ200mm 後輪/φ150mm

材質 重量 8.8kg

本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

TAIS 00030-000231
商品番号 09-4390-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミシェル WAW22

幸和製作所

軽量タイプの女性向けローター型歩行車
コンパクトで狭い道でも扱いやすい

四輪歩行車

杖立あり 屋内外向き



●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/3kg

サイズ
幅480×奥行575×高さ700~880mm
折りたたみ時幅240×奥行615×高さ700mm
ハンドル高:700~880mm(6ポジション)
座面高:450mm 座面:幅335×奥行275mm

材質 重量
本体:アルミニウム合金 5.6kg
座面:合成皮革・ナイロン
バッグ:合成皮革・ポリエステル

TAIS 00030-000194
商品番号 09-4320-1



ミケーレ WAG01

幸和製作所

ローター型歩行車で最軽量クラスの5.9kg!

四輪歩行車

杖立あり 屋内外向き



サイズ
幅535×奥行605×高さ790~950mm
折りたたみ時:幅235×
奥行645×高さ790mm
座面高:500mm 座面:幅385×奥行260mm

材質 重量
本体:アルミニウム合金 5.9kg
座面:合成皮革、ナイロン

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000175
商品番号 09-4280-1



ティコブリトルハイII WAW15

幸和製作所

幅広い高さ調節と大容量バッグが付いた
軽量コンパクト歩行車

四輪歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋外向き



●座面の上げ下げ
がラクラク

サイズ
幅520×奥行625×高さ740~920mm
折りたたみ時:奥行370×高さ815mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm

材質
本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル・ナイロン、座面:ナイロン

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/5kg

重量 約5.3kg
TAIS 00030-000173
商品番号 09-4210-1



サンティノ WAG02

幸和製作所

重量4.9kgの軽量設計
簡単折りたたみで安定感のあるフレーム構造

四輪歩行車

杖立あり 前輪2WAY 屋内外向き



サイズ
幅500×奥行635×高さ800~950mm
折りたたみ時:幅210×
奥行300×高さ895mm
押手高さ:800~950mm(6ポジション)

材質 重量
本体:アルミニウム合金 4.9kg
バッグ:合成皮革、ポリエステル

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000189
商品番号 09-4270-1



ティコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所

酸素療法したままで外出ができる
便利な歩行車が登場

四輪歩行車

前輪3WAY 屋外向き



サイズ
幅520×奥行640×高さ740~920mm
折りたたみ時:奥行425×高さ815mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行330mm

材質 重量
本体:アルミ 約5.6kg
座面:袋:ナイロン

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000165
商品番号 09-4220-1



ティコブリトルホーム WAW05

幸和製作所

小回りが利いて、楽に使える
屋内で大活躍

四輪歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋内用



●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/トレイ:2kg、カゴ:3kg

サイズ
幅470×奥行580×高さ640~910mm
折りたたみ時:奥行410×高さ715mm

材質
本体:アルミ トレイ:ポリカーボネート
カゴ:スチール
メッシュ袋:ナイロン・ポリエステル・
ポリプロピレン

重量 約5.5kg
TAIS 00030-000166
商品番号 09-4050-1



ティコブリトルスリム WAW04

幸和製作所

小回りが利いて、軽量コンパクト
軽さが魅力の歩行車で

四輪歩行車

前輪3WAY 屋外向き



サイズ
幅470×奥行580×高さ640~910mm
折りたたみ時:奥行350×高さ720mm
座面高:480mm 座面:幅235×奥行250mm

材質 重量
本体:アルミ、座面:ナイロン 約4.5kg
袋:ナイロン・ポリエステル

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/4kg

TAIS 00030-000163
商品番号 09-4240-1



ティコブリトルワゴンミニ WAW21

幸和製作所

ワゴンタイプの歩行車が更にコンパクトに!
お買い物に便利なカゴのせ歩行車

四輪歩行車

前輪3WAY 屋内外向き



サイズ
幅450×奥行595×高さ670~910mm
折りたたみ時:奥行415×高さ720mm

材質 重量
本体:アルミニウム合金 約4.9kg
袋:ポリエステル

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/6kg

TAIS 00030-000190
商品番号 09-4200-1

